



80028376 ver. A
Revisionsdatum: 2021-04
©2021 Welch Allyn, Inc.
Med ensamrätt.



Denna produkt är tillverkad av Welch Allyn, Inc. på licens av varumärket "Braun". Braun är ett registrerat varumärke som tillhör Braun GmbH, Kronberg, Tyskland. ThermoScan är ett registrerat varumärke som tillhör Helen of Troy Limited.

Hillroms tekniska support

hillrom.com/en-us/about-us/locations/

Welch Allyn Inc. är ett dotterbolag till Hill-Rom Holdings Inc.

Rengöringsguide

Termometerhölje



OBS! Placera ett nytt probskydd på termometern före rengöring.


Godkända rengöringslösningar

- 70-procentig isopropylalkohol eller etylalkohol
- Väteperoxid (Virox, Oxivir)
- Kvartära ammoniumföreningar (CaviWipes™, Clinell Universal Wipes®, Sanidloth)
- 10-procentig klorblekmedelslösning




Torka torrt. Låt torka i 5 minuter.
Se till att termometerhöljet är torrt före användning.

Termometerkontakter

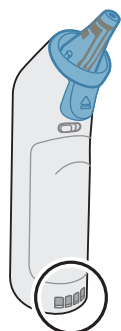

Godkända rengöringslösningar

- 70-procentig isopropylalkohol eller etylalkohol

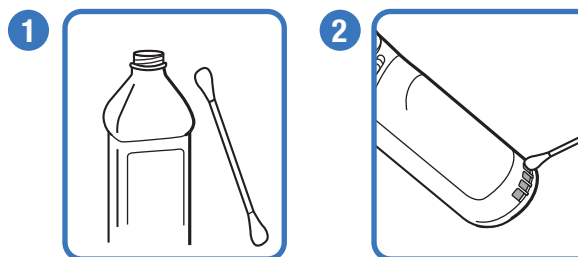

Lägg undan termometern under en minut, så att kontakterna hinner lufttorka.

Problinsfönster och prob



Godkända rengöringslösningar

- Endast 70-procentig isopropylalkohol eller etylalkohol!



Torka torrt. Låt torka i 5 minuter.
Se till att problinsfönstret är torrt före användning.